

Překlad návodu k použití.

Před použitím si přečtěte celý návod k použití a ponechte jej přiložený u respirátoru, aby se s ním obsluha mohla seznámit. Pokud výrobek prodáváte, přiložte k němu i tento návod k použití. Zamezte poškození tohoto návodu. Výrobce nenese odpovědnost za případnou zdravotní újmu vzniklou nevhodným používáním respirátoru, které je v rozporu s tímto návodem.



Respirační rouška typ polomaska filtrující částice
Bezventilová respirační polomaska.

Účinnost filtru $\geq 95\%$

Doba použití: 8 hodin

Třída: FFP2 NR

Model č.: JD-99

Rozměr: 105mmx155mm (+/- 3mm)

Testováno na základě: EN 149:2001+A1:2009 Osobní ochranná pomůcka a dle direktivy: (EU) 2016/425

Pro zajištění dostatečné ochrany respirátorem je potřeba dodržet následující postup:

1. Stanovit druh škodlivin
2. Určit toxickou látku
3. Lokalizovat a zaznamenat toxicitu a koncentraci toxické látky
4. Porovnat s limitní hodnotou doby expozice respirátoru
5. Určit typ filtru (P1, P2, P3), aby byl dostatečný pro zajištění ochrany, přičemž je nutné brát v úvahu prostředí, kterému je osoba vystavena (např. vliv teploty, vlhkosti atd.).

UPOZORNĚNÍ:

Respirátor nesmí být použit v prostředí s nebezpečím výbuchu.


Pro zajištění ochrany respirátorem je nutné jej správně nasadit a umístit na obličej, neboť při špatném nasazení a umístění se výrazně sníží úroveň ochrany!

Požadavky na těsnost nebudou splněny, jestliže má uživatel vousy nebo vlasy na dosedací ploše těsnící linie.

Před nasazením respirátoru jej zkontrolujte, zda je kompletní a není mechanicky poškozený. Nepoužívejte respirátory, které jsou používány déle než 8 hod., respirátory se zvýšeným dýchacím odporem a zanesením, či s prošlou dobou expirace, která je uvedena na obalu respirátoru.

Návod jak nasadit masku:

1. Část s nosním můstkem směřuje vzhůru, strana bez nosního můstku se přikládá na obličej. Ušní popruhy zachytíte za obě ruce. Nasadíte masku nejříve na bradu a natáhnete ušní popruhy a zavěste je za uši tak, aby maska pohodlně seděla.
2. Z obou stran přiložte prsty k prostředku nosního můstku a zatlačte směrem k obličeji a přizpůsobte nosní můstek tvaru nosu.
3. Přiložte dlaně na nasazenou masku a zkontrolujte těsnost nasazení masky na obličej. Pokud respirátor netěsní a vzduch proniká kolem nosu nebo jinde kolem těsnící linie, je nutné znovu upravit nasazení respirátoru posunutím do vhodnější polohy, úpravou vytváření nosního pásku či posunutím upínacích pásků do vhodnější polohy viz. obr.3.

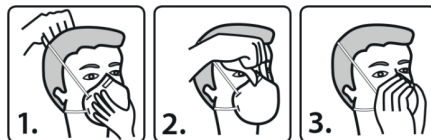

UPOZORNĚNÍ:

V případě zvýšení dýchacího odporu respirátor vyměňte za nový.

Maska by měla být časem vyměňována, dlouhodobé užívání není doporučeno.

Maska by neměla být používána, pokud dobře nesedí nebo pokud je obtížné ji správně nasadit.

Tento produkt není pratelný. Ujistěte se, že je užíván v rámci své trvanlivosti.

Význam značení na respirátoru a obalu:




Odpovídá požadavkům EU na osobní ochranné prostředky.



Před použitím si přečtěte návod k použití.



Maximální vlhkost při skladování.

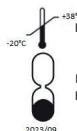

Rozsah teplot pro skladování.

Konečné datum životnosti respirátoru (datum expirace) – uvedeno na obalu respirátoru.

EN149:2001+A1:2009 – Norma stanovující požadavky na filtrační polomasky k ochraně proti částicím + rok vydání této normy.

Úroveň a rozsah ochrany. Účel použití respirátoru.

Respirátor (filtrační polomaska) je určen pro ochranu před prachovými a vodními aerosoly s mírnou toxicitou a dráždivostí do 10 násobku NPK¹ pro látky, jejichž PEL² je $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$. Koncentrace škodlivin musí být nižší než 0,5% nebo 5000 ppm³. Jedná se např. o bavlnu, len, hedvábí, syntetická textilní vlákna, peří, mouku, tabák, čaj, koření, pryskyřice, sklolaminát, dřevo atd. Respirátor nechrání proti plynům a nižšímu obsahu kyslíku ve vzduchu. Respirátor nesmí být používán déle, než po dobu jedné pracovní směny, tj. max. 8 hod., pak je nutné jej vyřadit. Die EN149+A1 je respirátor používaný po dobu nejvýše jedné pracovní směny (max. 8 hod.) považován za jednorázový. Jeho životnost je však závislá na koncentraci prachu v prostředí i aktivitě uživatele. Respirátor musí být vyměněn, pokud prach pronikl respirátorem a bylo-li zjištěno jeho vnitřní znečištění, pach nebo jiný příznak průniku škodliviny respirátorem. Dále také pokud došlo k jeho poškození nebo podstatnému zvýšení dýchacího odporu a dýchání se stalo obtížným. Respirátor není určen k čištění a desinfekci.

¹NPK – nejvyšší přípustná koncentrace chemické látky v ovzduší

²PEL – přípustný expoziční limit chemické látky či prachu v ovzduší.

³PPM – Koncentrace udává jako počet částic dané látky na jeden milion částic.

SKLADOVÁNÍ

Respirátor musí být uchováván v prostředí při teplotě od -20°C do +38°C při relativní vlhkosti do 80%. Skladujte na suchém a větraném prostoru a mimo oheň a hořlavé materiály.

ZÁRUKA

Záruka 24 měsíců od data prodeje se vztahuje vady materiálu a zpracování. Uchovávejte prosím doklad o koupi.

ES Prohlášení o shodě

Výrobce Wenzhou Jiada Technology Co., Ltd. No. 401, Building 19th Rainbow Wisdom Park, Longgang City, Zhejiang Province, Čína +8615858781313 prohlašuje, že popsané osobní ochranné prostředky respirátor model JD-99 s třídou filtru FFP2 NR jsou v souladu se směrnicí (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích, a s technickou normou podle č. EN 149+A1:2009. Certifikát č. 0370-4483-PPE/B vydal LGAI Technological Center, S.A. Španělsko NB.0370.